

版本号：v1.0

紫外线物品消毒器

使用说明书



天津市精工医疗设备技术有限公司

01 概述

简介

产品名称：紫外线物品消毒器

型号：JG-592800

生产企业名称：天津市精工医疗设备技术有限公司

生产地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十一道 102 号

邮编：300300

电话：400-666-8102

售后服务单位：天津市精工医疗设备技术有限公司

售后专线：13102235008

产品特点

我公司研发的紫外线物品消毒器，主要通过紫外线灯对物品进行杀菌消毒，该产品适用于需要紫外线消毒的物品。


02 安全使用注意事项

- 电源插座必须有可靠的接地线，用户不得擅自改插头，严禁无接地运行。
- 发热管或（紫外线灯管）损坏，或用至寿命极限时，应联系维修人员更换相同功率的发热管（紫外线灯管）。
- 耐温低于 90℃的物品不能放置于本产品中消毒、烘干。
- 工作周期结束后才能打开柜门，以免影响消毒效果。
- 如出现故障或电源线损坏，切勿自行修理替换，应尽快通知维修人员进行维修。在保养维修时，应首先拔下电源插头。
- 需要消毒的物品避免携带过多水，防止造成电路故障。
- 关好柜门后机器才能工作，消毒过程中严禁开门。
- 工作过程中请勿触摸玻璃门，避免烫手。
- 切勿将机器安装在易燃物附近，否则会有引起燃烧的风险。
- 禁止机器安装在可能受潮或被水淋湿的地方。

03 技术参数

1. 电源：AC 220V/50Hz；额定功率：250W
2. 消毒方式：紫外线杀菌
3. 紫外线功率：4W
4. 紫外线波长：250-270 nm
5. 产品尺寸：430*400*400（长*宽*厚 mm）
6. 包装尺寸：480*435*435mm
7. 净重：7.5kg

04 使用说明

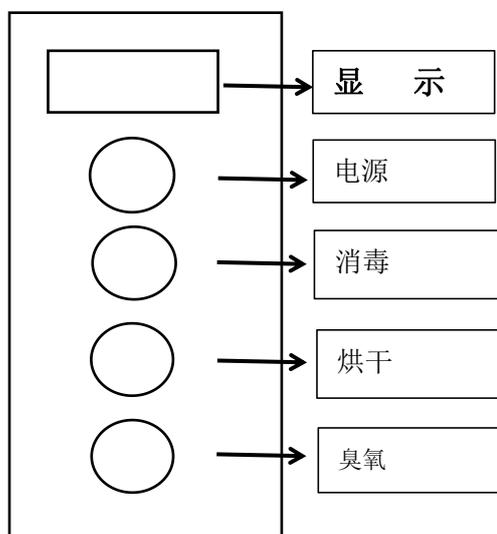

● 电源

待机为红色，开机为蓝色。待机状态下长按 5 秒以上可以调温，50℃~90℃ 随意设置，消毒键为加温，烘干键为减温，按一下为 1 度，出厂默认为 60℃。

● 消毒

根据需求，按消毒键，选择消毒时长，15 分钟—30 分钟—45 分钟—60 分钟（循环），机器开始工作，紫外线、烘干、臭氧功能同时启动。

● 烘干

默认烘干时长 30 分钟，再按一下切换到烘干时长 60 分钟。

● 臭氧

默认臭氧时长 30 分钟，再按一下切换到臭氧时长 60 分钟。

注意：

- 关好门后，才能开机工作。
- 眼睛不能直接目视紫外线，避免紫外线辐射。
- 工作结束 20 分钟后才能打开柜门，以免烫伤。
- 为了安全，避免特殊使用人群（如儿童等）直接接触本产品。

05 故障分析与排除

常见故障的处理

当紫外线物品消毒器出现故障时,可通过查阅产品说明书中的故障分析与排除,以帮助您处理一些常见的故障。如果出现的故障您不能自己解决,请联系厂家或寻求专业人员提供帮助,切勿自行拆卸维修,避免危险和对机器造成损坏。

故障现象	故障可能原因	排除方法
指示灯不亮	停电或插头没插	检查电源插头
	电路故障	联系商家或咨询售后
无法烘干	物品放置太多	减少物品数量,加长烘干时间
	电路故障	联系商家或咨询售后
机器不工作	柜门没关好,门控开关没接通	关好柜门
	电路故障	联系商家或咨询售后
柜内有异味	柜内不洁	清洁柜内箱体
	消毒周期未结束就打开了柜门	消毒周期结束后再打开柜门,取出物品
无烘干温度	发热系统故障	联系商家或咨询售后

常见故障代码

报错	原因	解决办法
E5	未关好门	重新检查门体是否关好
E3	加热温度故障	联系商家或咨询售后

06 维修保养

维护保养

- 清洁前，必须拔下电源插头。
- 清洁时，内外表面可用软布蘸中性清洁剂擦拭。
- 避免使用抛光机、去污粉等有毒性、腐蚀性的清洁剂擦拭。
- 严禁直接泼水喷淋内外箱体，以免电路绝缘不良而产生触电危险。

运输条件及方法

包装后的机器可使用一般交通工具运输，但应防止运输中的剧烈冲击和震动及雨雪淋溅。

信誉卡

尊敬的阁下：

首先欢迎您使用我公司生产的紫外线物品消毒器，对您的信任，我公司表示由衷地感谢。

为了使该机更好地为您服务，以及落实我公司的售后服务，请您在首次使用本机时将此卡寄回公司本部，以便立档。（本机自售出之日起保修一年）

谢谢！

天津市精工医疗设备技术有限公司

使用单位（全称）：_____

机器名称：_____

使用机器编号：_____ 出厂日期：_____

单位地址：_____

单位电话：_____ 传真：_____ 邮编：_____

使用单位公章

住所： 天津自贸试验区（空港经济区）西十一道 102 号

生产地址： 天津自贸试验区（空港经济区）西十一道 102 号

邮编： 300300

电话： 400-666-8102

售后服务单位： 天津市精工医疗设备技术有限公司

售后专线： 13102235008

E-mail: info@jinggong-medical.com