

PV系列石膏振荡器

使用说明书



目录

1.前言.....	2
2.标准配置.....	2
3.主要技术参数.....	2
4.图例说明.....	2
5.运输和存储.....	3
6.用途.....	3
7.注意事项.....	3
8.设备各部件说明.....	3
9.设备保养.....	3
10.操作方法.....	4
11.故障排除.....	4
12.售后服务.....	5
13.公司信息.....	5

前言

感谢贵单位购买和使用本公司生产的PV系列石膏振荡器。在使用本产品之前, 请仔细阅读本说明书, 并请妥善保管本说明书。本公司保留对产品设计、技术或配件、使用说明书或产品包装内容随时进行修改的权力, 恕不另行通知。

标准配置

一台完整的石膏振荡器应包含以下物件。

主机	一台	电源线	一根
使用说明书	一份	保修卡	一份
合格证	一份		

主要技术参数

项目\型号	PV- I	PV- II
电 源	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
输入功率	175W	150W
熔 断 器	250V2.5A	250V2.5A
设备重量	4.7Kg	2.8Kg
外形尺寸	250×180×92mm	210×150×80mm
防护等级	IP20	IP20
运行模式	间歇式运行	间歇式运行
设备安全类型	I 类	I 类

图例说明



注意! 查阅随机文件



保护接地

警告:

本产品在使用时可能对周围环境会产生轻微的电磁干扰,当用户同时使用对电磁干扰较敏感的其它产品时远离本设备。

运输和存储

PV系列石膏振荡器应在下列条件运输与存储:
环境温度:-40℃～70℃
大气压力:500HPa～1060 Hpa

用途

灌注石膏及其它材料时,提供振动源,预防气泡的产生。

注意事项

- 1.请使用带接地线的专用电源。
- 2.请勿放置在易燃性物品附近。
- 3.设备在工作过程中可能会产生轻微移动,请操作者不要远离设备。
- 4.为了保护我们共同的环境,在设备报废后请妥善处理。

设备各部件说明

- (1)按压开关

(2)能量调节旋钮

(3)橡胶盖板

(4)电源插座

(5)熔断器

(6)电源线



设备保养

如果设备表面有灰尘或污点,请用布或用布蘸中性清洁剂进行擦拭。切勿使用有机溶剂进行擦拭,以免造成设备表面褪色。

操作方法

- 1.使用前请将设备放置在表面平坦、强度足以承受的室内平台上。
- 2.将电源线插头插入机器后面的电源插座内。
- 3.按下设备前面的绿色按压开关,开关内部的绿色指示灯亮,同时石膏振荡器开始工作。
- 4.顺时针旋转设备前面板上的能量调节旋钮,选择合适的振动能量。
- 5.根据工作需要,将需要振荡的物件放置到石膏振荡器的橡胶盖板上。
- 6.工作完毕,将能量调节旋钮逆时针旋转到振荡器的最小能量。
- 7.再次按压设备前面的绿色按钮开关,开关内部的绿色指示熄灭,石膏振荡器停止工作。

故障排除

如果发生故障,可以采取如下的解决方法,如果仍无法正常工作,请与当地经销商或本公司联系。

故障现象	可能原因	解决方法
按下按压开关设备仍未通电	电源插头接线不良	插好电源插头
	熔断器烧毁	更换熔断器，再烧毁时则送修
按压开关指示灯亮但设备不工作	电路板故障	更换电路板
	电磁铁故障	送修
工作中设备移动	吸盘不平整	更换吸盘

售后服务

本设备自售出之日起免费保修壹年;但由于用户原因,造成设备损坏的,不在保修范围之内;对由非本公司所指定的专业维修人员维修而造成的不可修复性设备损坏,不属于免费保修范围。

生产日期:详见设备标签

生产企业:咸阳荷立医疗器材有限公司

生产地址:陕西省咸阳市秦都区世纪大道清华科技园北区一号

联系电话:029-33693391

网址:www.xyholy.com

使用期限:12年

传真:029-33693392

邮箱:xyholy@xyholy.com

使用说明书编制日期:2012年03月20日

使用说明书修订日期:2025年03月28日